

Utilização prevista

Produto de apoio para ajuda na marcha, manuseado por ambos os braços. Proporciona mobilidade sobre rodas e apoio corporal a pessoas com problemas de mobilidade, equilíbrio ou capacidade limitada para andar.

Regulamentos

Este dispositivo é um dispositivo médico de Classe I e está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos. Para embalagem e eliminação de produtos, cumpra rigorosamente os regulamentos legais da sua comunidade.

Especificações

- Rollator conversível em uma cadeira de transporte. O encosto pode ser mudado para o outro lado para facilitar a transferência. Também pode ser rebatido quando o assento é levantado.
- Estrutura de alumínio encartável
- 2 rodas dianteiras de 250 mm de diâmetro, 2 rodas traseiras de 2 x 200 mm
- Apoios de braços fixos
- Repousa Pés rebatíveis
- Cesta incluída
- Altura do assento: 53,5 cm
- Dimensões do assento: 36 x 39 cm
- Altura do punho: 85-100 cm
- Largura total: 60 cm
- Profundidade (incluindo apoio para os pés): 107 cm
- Peso líquido do artigo: 10,8 Kg
- Peso máximo suportado: 136 Kg

Vida

O período de vida do produto é influenciado pelas suas condições de utilização e armazenamento e pela regularidade da sua manutenção. Cumprindo com as informações fornecidas neste manual de instruções, é possível mantê-lo em perfeitas condições por 24 meses

Garantia

Garantimos aos nossos clientes os produtos contra quaisquer defeitos de fabrico durante dois anos a contar da data da fatura. Para mais informações, consulte os nossos termos e condições gerais de venda.

Aviso prévio

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado à Suciores de Manuel García, S.L. e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente estão estabelecidos.

REF 22262


ROLLATOR + CADEIRA DE RODAS (2 EM 1)



Suciores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

MANUAL DE UTILIZADOR

Utilização correta

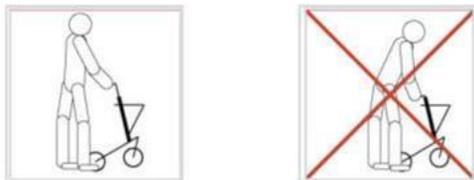

1. Empurre o rolante e coloque-o confortavelmente à sua frente, certificando-se de que as quatro rodas repousam no chão.
2. Com cuidado, ande para a frente, empurrando o rollator.
3. Mantenha sempre uma posição vertical. Lembre-se que as alças são ajustáveis em altura para garantir uma posição ideal e evitar problemas nas costas.

Como travar

- Ative e desative sempre os bloqueios das rodas em ambos os lados simultaneamente.
- Para abrandar ou parar temporariamente, puxe para cima com quatro dedos, como mostrado na imagem. Quando a unidade abrande ou pare.
- Para bloquear temporariamente as rodas, pressione para baixo como mostrado na imagem. Quando a unidade indicar que as rodas estão bloqueadas.



Precauções

- Antes de cada utilização, deve certificar-se de que o produto está em perfeitas condições.
- Não utilize o produto em caso de defeito visível. Em caso de peças em falta, mal ajustadas ou danificadas, consulte o farmacêutico ou o revendedor.
- Antes de utilizar, verifique se as pegas estão ajustadas à mesma altura e se é adequado para o utilizador.
- Antes de usar, verifique se os pinos de ajuste de altura estão bloqueados.
- Tenha cuidado ao usar em tapetes, superfícies molhadas, escorregadias (folhas, cascalho, areia) ou com neve.
- Não utilizar em superfícies geladas.
- O não cumprimento das instruções, avisos e notas no manual do utilizador pode resultar em danos físicos para si ou para outros, ou danos para o produto.
- Os roladores devem ser sempre utilizados para o fim a que se destinam. Não devem ser utilizados para qualquer outro fim. Por exemplo, não devem ser usadas como cadeiras de rodas, como espreguiçadeiras, etc.
- Adequado para uso interior e exterior.
- Não faça modificações (alterações mecânicas) de forma a não comprometer a sua segurança de utilização.
- Não exceda o peso máximo.

Contraindicações

O produto não se destina a ser utilizado por pessoas com problemas graves de equilíbrio ou perturbações funcionais da percepção.

Recomendações de conservação e lavagem

- Limpe e seque periodicamente. Retire a sujidade com um pano macio e húmido e sabão neutro. Seque depois. Não use produtos químicos agressivos ou abrasivos, eles podem danificar o material do produto. Além disso, não use produtos gordurosos que possam degradar materiais ou torná-los escorregadios.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde-o num local seco à temperatura ambiente.
- Verifique se as rodas giram livremente e se estão em boas condições. Fale com o seu revendedor se precisar de os substituir.
- Verifique periodicamente porcas e parafusos. Em caso de peças em falta, mal ajustadas ou danificadas, contacte o seu revendedor.

Simbologia

	Referência do Produto		Data de Fabrico
	Dispositivo Médico		Número de Lote
	Certificado CE		Manual de Instruções
	Fabricante		Advertências
	Distribuidor		Importador